



NOVUS™  
Masque nasal de PPC



Assistance Respiratoire au Domicile ▪ Novus masque nasal de PPC



## Novus™ masque nasal de PPC

Le masque nasal de PPC Novus est une interface confortable et légère conçue pour une utilisation chez le patient adulte (>30kg) dans le cadre d'une thérapie PPC ou à double niveau de pression prescrite au domicile.

Le masque nasal de PPC Novus a été développé pour offrir une solution simple et bien tolérée dans le domaine de l'assistance respiratoire au domicile. Il contient peu d'éléments, représentant un réel bénéfice lors de la mise en place et de l'ajustement, ainsi que lors du nettoyage dans un environnement domestique.

Le masque nasal de PPC Novus est disponible en deux tailles, avec une bulle souple en silicone, pour offrir un ajustement efficace et confortable, convenant à la majorité des patients.

### Espaceur frontal amovible

Offre une option d'ajustement supplémentaire pour répondre à la majorité des besoins

### Coque profilée en polycarbonate teinté

Légère, résistante et discrète

### Fuite intentionnelle

Orienté les gaz expirés loin de l'utilisateur

### Bulle souple en silicone

Pour procurer une étanchéité efficace et un ajustement confortable

### Raccord à rotule fixation rapide

Connexion/déconnexion rapide et facile du tuyau de ventilation






## Novus™ masque nasal de PPC

**Serre-tête respirant**  
Confortable pour l'utilisateur

### Système d'attache rapide

Facilite la mise en place du serre-tête et peut être placé d'un côté ou l'autre du masque, pour convenir à chaque utilisateur

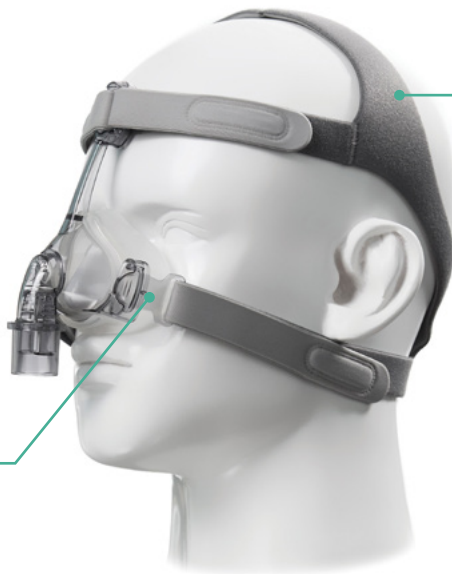

## Informations de commande

Le masque nasal de PPC Novus est disponible en deux tailles, moyen et grand.

REF	Description	Langues incluses dans les Instructions d'Utilisation	Qté/bte
7770000	Novus masque nasal de PPC, grand	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien	8
7790000	Novus masque nasal de PPC, moyen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien	8

## Accessoires

REF	Description	Qté/bte
7776000	Serre-tête pour masque nasal de PPC Novus (avec clip pour système d'attache rapide inclus)	20
5318000	Tuyau 22mm intérieur lisse polypropylène avec raccords souples, 22F-22F, 1.8m	50
5418000	Tuyau 15mm intérieur lisse polypropylène avec raccords souples, 22F-22F, 1.8m	50



## Mise en place du masque

Comment obtenir un ajustement confortable et sans fuite.



1. Retirer le raccord à rotule du masque, en pressant sur les barrettes de maintien.



2. Insérer le raccord à rotule dans le tuyau respiratoire.



3. Maintenir le masque et le serre-tête.



4. Placer le masque sur le nez et le maintenir en position. Enfilez doucement le serre-tête autour de la tête en s'assurant que les lanières inférieures passent sous les oreilles.



5. Vérifier que les lanières ne sont pas torsadées, puis faire passer la lanière restante dans le crochet du masque.



6. Pour ajuster les lanières frontales, les détacher, les tirer de manière uniforme, puis les attacher de nouveau sur le serre-tête. La fixation doit être sécurisée mais non trop serrée.



7. Pour ajuster le masque, détacher les lanières inférieures, les tirer de manière uniforme puis les attacher de nouveau. La fixation doit être sécurisée mais non trop serrée.



8. S'assurer que l'appareil de PPC/VDNP est en marche. De l'air doit s'écouler du tuyau de ventilation. Connecter le raccord à rotule et le tuyau sur le raccord coulé du masque jusqu'à entendre un 'clic'.



9. Si nécessaire, réajuster les lanières du serre-tête pour supprimer les fuites éventuelles. **Ne pas trop serrer le masque.** Si des fuites persistent, soulever le masque puis le repositionner sur le nez avant de réajuster les lanières du serre-tête.

IS1.44\_R1 FR • Issue 3 11.24